

ストレッチャースケール

AD-6051

取引・証明用
検定付

精度等級
3級



寝た状態で安全に搬送、計量

ストレッチャースケール

取引・証明用
検定付

AD-6051 ¥850,000(税抜)

患者の搬送や計量ができるストレッチャー型の検定付体重計。
病院・老健施設等の入所者の栄養ケアマネジメントやNST(栄養サポートチーム)活動での
体重測定におすすめの体重計です。

寝台部高さ調整 高さ 550～950mm

クランクを回すことで、寝台部の高さを約550～950mmまで無段階に調整ができます。




安全

キャストータータルロック機能

前輪直進固定

4輪フリー

固定(ブレーキ)

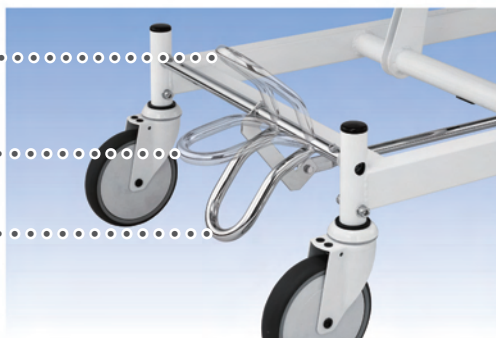

キャスターは、レバーのワンタッチ操作で4輪をロックすることができます。



ガートル棒
(オプション)

※ ソフトカバー付きサイドレール、ガートル棒および酸素ボンベ金具はオプションです。
また、酸素ボンベ、減圧弁、輸液バック等はご使用イメージのために取り付けしたもので、
当社では取扱をしておりません。

標準サイドレール



ソフトカバー付きサイドレール (オプション)



※ ソフトカバー付きサイドレールは、標準サイドレールより約30mm高さが高くなります。
患者さん移送時の安全性も向上します。

プリンタ内蔵表示器

見やすい角度に調整が可能です。また、電池交換も非常にスムーズ



酸素ボンベ金具

500ℓ 対応 (オプション)



便利な小物入れ用カゴ付き

移送時にご利用いただけます。



正確

薄型重量センサ

Sensor

薄型・高性能の重量センサにより、計量台の厚みを薄くすることができ、センサを計量台の四隅に使用することで、乗る位置にかかわらず、バラツキがなく、高精度で正確な計量が可能となりました。



便利

風袋2メモリ

Tare

着衣などの重量を2つまで設定ができ、設定重量を引いた体重のみの表示が出せます。



プリンタ内蔵

Printer

プリンタは、表示器ケースに内蔵されていますので、ケーブル接続や出っ張ってジャマになる事はありません。測定者が体重値をメモする必要がなく、記録が残せます。

2010/ 6/ 1 12:00 72.9kg	2010/ 6/ 1 12:00 (N) 67.9kg (T) 5.0kg	2010/ 6/ 1 12:00 (N) 71.9kg (PT) 1.0kg
通常測定	風袋引き測定	プリセット風袋引き測定

(N) : 正味量 Net
総量から風袋量を差し引いた正味の質量です。
表示してある体重値は風袋量を差し引いてあります。

(T) : 風袋量 Tare
実際に測定した着衣などの質量です。

(PT) : プリセット風袋 Preset Tare
事前に把握している着衣などの質量を風袋設定した値です。

オプション



ソフトカバー付きサイドレール（2本1組）

- ・工場オプション AD6051-01 ¥30,000(税抜)
※ 標準のサイドレールは、付属されません。
JANコード 4981046712958
- ・後付けオプション AD6051-02 ¥35,000(税抜)
※ 本体ご購入後に取り付けの場合は、こちらをご指定ください。また、標準サイドレールの下取りはできません。
JANコード 4981046712965



ガートル棒

AD6101-01 ¥6,000(税抜)
JANコード 4981046712194



酸素ポンペ金具

AD6051-03 ¥26,000(税抜)
JANコード 4981046712972



拡張電池ボックス

AD6051-04 ¥40,000(税抜)
JANコード 4981046713764



プリンタ用紙(5巻/箱) 紙幅58mm 長さ30m
AX-PP147-S ¥5,000(税抜)
JANコード 4981046711340



専用ACアダプタ ※付属品と同じ
AX-TB162 ¥4,500(税抜)
JANコード 4981046712835



付属品用ポーチ
〈本体に付属されています。〉
※ オプション販売はございません。

スライディングマットSM-100

AS-SM100
¥60,000(税抜)
JANコード 4981046712217



ベッドからストレッチャーへ寝たままの状態で
患者の乗せ換え、移動ができます。


保管時は、半分に折りたためます。

使用方法


1. ベッドにストレッチャーを横づけし、高さを合わせます。
2. 患者を横向きにし、スライディングマットを差し込みます。
3. 患者を軽く押すことで、マットカバーが回転し移動させます。
4. 患者を横向きにし、スライディングマットを抜き取ります。

仕様


寸法	500 (W) × 1800 (D) × 25 (H) mm
質量	1.4 kg
材質	芯材 (ポリエチレン)、カバー (ポリエステル)

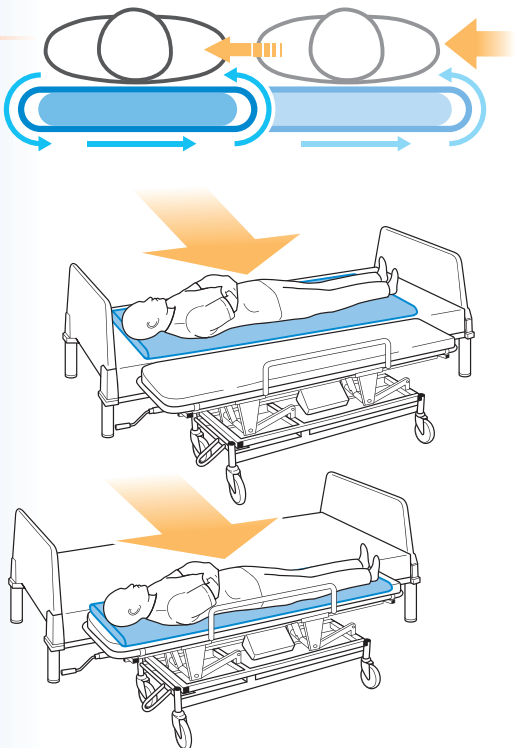

■ 本体

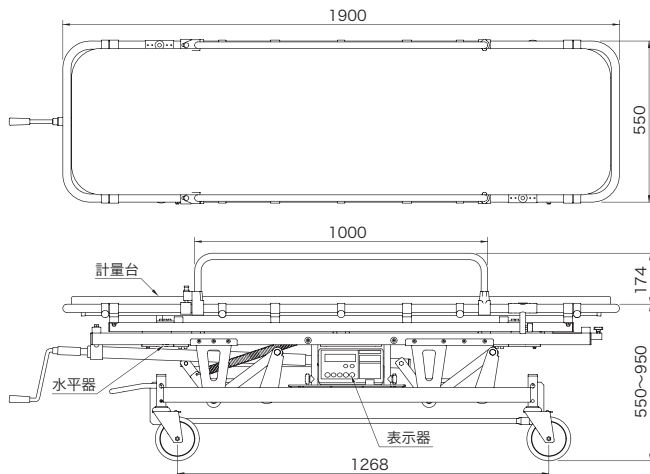

■ 表示器

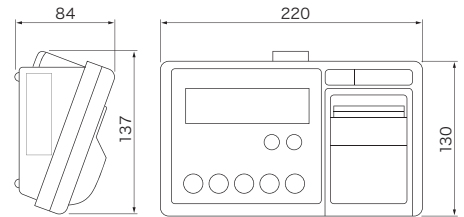

単位：mm

仕様

品名	ストレッチャースケール
型名	AD-6051
精度等級	3級(※ご使用地域をご指定ください。)
承認番号	第D109号
ひょう量	150kg
目量	100g
実目量	20g
最小測定量	2kg
最大減算風袋量	150kg
使用温湿度範囲	温度：+5℃～+35℃ 湿度：85%RH以下(但し結露なきこと)
保存温度範囲	温度：-10℃～+60℃
表示	7セグメント液晶表示 文字高：22mm
印刷機能	あり
外部出力	RS-232C 1ch(D-SUB 9P)
外形寸法	1900(W)×550(D)×550～950(H)mm 突起部含まず
計量スペース	1900(W)×550(D)mm
本体質量	約74kg(ACアダプタ、乾電池含まず)
電源	専用ACアダプタ AX-TB162：AC100V,50-60Hz,10VA 単3形アルカリ乾電池：6個(別売) ※補助としてご使用ください
乾電池寿命	アルカリ乾電池使用時 連続動作300回以上(乾電池寿命は、周囲の環境や温度により異なります。)
付属品	専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、プリンタ用紙、付属品用ポーチ
標準価格(税抜)	¥850,000
商品コード	AD6051
JANコード	4981046701099

使用地域区分

使用地域(都道府県)		使用地域の表記 重力加速度の範囲
1	北海道	9.807～9.803m/s ²
2	青森県、岩手県、宮城県、秋田県	9.804～9.800m/s ²
3	宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県	9.802～9.798m/s ²
4	栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈・小笠原を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県	9.800～9.796m/s ²
5	長野県、東京都(全域)、神奈川県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.798～9.794m/s ²
6	鹿児島県【大隅地方(鹿屋市、垂水市、曾於市、志布志市、大崎、東串良、錦江、南大隅、肝付の各町)、種子島・屋久島地方、奄美地方】	9.794～9.790m/s ²
7	沖縄県	9.792～9.789m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

販売元

AND株式会社 エー・アンド・デイ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-4805-1204(直) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*AD6051-ADJC-04-PR4-14600